

Mepiform®
Previene e riduce
le cicatrici

Medicazione per il trattamento e la prevenzione
di cicatrici ipertrofiche e cheloidi.

Mepiform® con Safetac® in silicone morbido per il trattamento e la prevenzione di cicatrici

Mepiform® sottile, flessibile e discreto⁵


Mepiform® è una medicazione aderente, in silicone morbido, delicata, efficace e confortevole per il trattamento e la prevenzione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi. Lo strato di contatto in morbido silicone è Safetac®, che non causa la rimozione di cellule epidermiche, lasciando la pelle intatta. La particolare flessibilità è la ragione per cui Mepiform® è stata scelta e raccomandata da professionisti internazionali nel trattamento delle cicatrici.



Gli esperti approvano la scelta¹

Una documentazione internazionale raccomanda l'uso di fogli di silicone nel trattamento delle ferite chiuse. Questa bibliografia rivisita dati internazionali (Medline, E Embase, Amed, Cochrane Library, World Wide Wounds), rivelando più di 20 raccomandazioni scientifiche su Mepiform, confermando la sua efficacia nel trattamento di cicatrici ipertrofiche e cheloidi. Mepiform è sottile e discreto, molto facile da usare. Si applica e si dimentica di averlo addosso.

Efficacia dimostrata nel 90% dei casi

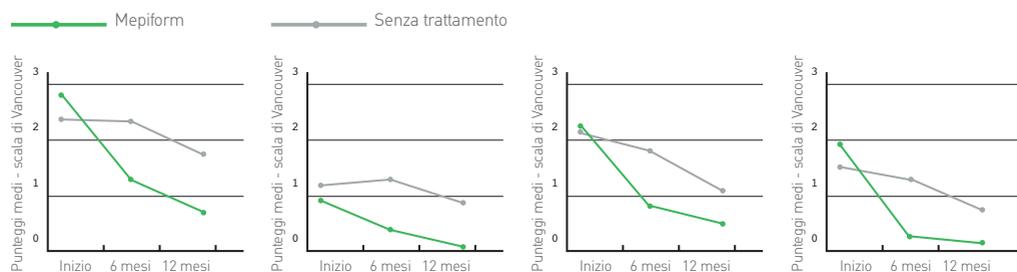

Casi clinici

PRIMA

DOPO



Cicatrice da scottatura



Significativa riduzione di cheloidi

Commenti: quasi completa scomparsa di ipertrofia, significativa riduzione di cheloidi. Nonostante la complessità del trattamento di cheloidi, i risultati sono stati straordinari. Il paziente ha riferito che il trattamento con Mepiform® è stata di facile utilizzo, in quanto è molto sottile e non richiede ulteriore fissaggio, non interferendo con le sue attività quotidiane.



Ferita da lacerazione



Dopo 7 mesi di trattamento

Commenti: dopo 7 mesi di trattamento, la cicatrice è diventata piatta, con solo qualche zona isolata di pigmentazione. Dopo 11 mesi di trattamento, il paziente si è dichiarato molto soddisfatto dell'aspetto finale, riferendo che la medicazione è stata di facile utilizzo, che ha reso più facile la continuità del trattamento senza che interferisse con le attività quotidiane.



Cicatrice da trauma



Dopo 7 mesi di trattamento

Commenti: dopo 7 mesi di trattamento la cicatrice è completamente piatta. I risultati sono spettacolari, sia in termini funzionali che estetici. Il paziente è stato sottoposto a quasi otto mesi di trattamento con Mepiform®. Il paziente è molto grato e soddisfatto dei risultati.



Cicatrice chirurgica post-carcinoma



Dopo 4 mesi di trattamento

Commenti: il trattamento con Mepiform® è stato avviato 8 mesi dopo l'intervento chirurgico. Il paziente non ha riportato alcun dolore durante i cambi di medicazione. Ha riferito un'ottima facilità nell'utilizzo e nel riposizionamento della medicazione. Dopo 4 mesi di trattamento, l'aspetto della cicatrice risultava molto più discreta, molto più appiattita e molto meno evidente rispetto a prima che il trattamento venisse iniziato.



Cheloidi da cicatrice da taglio



Dopo 6 mesi di trattamento

Commenti: 6 mesi dopo. È molto importante che il trattamento di cheloidi venga iniziato il prima possibile. In questo caso, un anno dopo l'apparizione di cheloidi, Mepiform® ha dimostrato la sua efficacia come trattamento. La medicazione è stata rimossa ogni 24 ore e la stessa riapplicata, per una media di 2 settimane.



Cicatrice da bruciatura



Fine del trattamento


Commenti: la cheloide è molto più discreta. Secondo il parere del medico, la cicatrice è migliorata sensibilmente. Questo miglioramento è dovuto alla riduzione della pigmentazione della cicatrice e all'assenza di ipertrofia.

Modalità d'uso

- Applicare su pelle asciutta, non utilizzare su ferite aperte
- Si può rimuovere Mepiform per ispezionare e detergere la cute. La medicazione può essere poi riapplicata.
- Si consiglia di usare Mepiform da 2 a 4 mesi a scopo preventivo.
- Per un miglior risultato, si consiglia di mantenere la medicazione il più possibile.

Formati a disposizione


Codice	Dimensioni	Pezzi
293640	cm 4 x 30	5
293740	cm 5 x 7,5	5
293750	cm 10 x 18	5

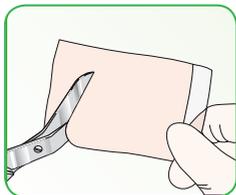

Rimuovere la pellicola protettiva. Se necessario, tagliare la medicazione della dimensione appropriata alla ferita



Applicare Mepiform sulla ferita. Non necessita di ulteriori sistemi di fissaggio

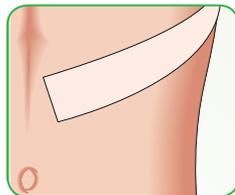

Rimuovere la medicazione una volta al giorno per ispezionare e detergere la cute. La medicazione può essere riapplicata e non deve essere lavata.



Fattore di protezione classe 5



Ritagliabile



Resistente all'acqua



Clinicamente provato



Altamente flessibile



Riapplicabile per 7 giorni o più

Fonti

1. International Clinical recommendations on Scar Management. Mustoe TA et al. Plast. Reconstr. Surg. 2002 Vol. 110, No 2, 560-571.
2. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005.
3. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001.
4. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008.
5. J. I Colom Maján. Evaluation of a self-adhesive soft silicone dressing for the treatment of hypertrophic postoperative scars. Journal of Wound Care 2006. The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac®, Mepiform®, Mepilex® and Mepitel® are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB. © Copyright (2010) Mölnlycke Health Care. All rights reserved. Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00. www.molnlycke.com

Per saperne di più: www.molnlycke.it

Mölnlycke® Health Care Srl - Piazza Pio XI 1, Milano - Tel. +39 0331 714011

I marchi e i nomi Mölnlycke® Health Care, BARRIER®, Biogel® e Safetac® e i rispettivi loghi sono registrati a livello mondiale a nome di una o più società del Gruppo Mölnlycke® Health Care. © 2016. Mölnlycke® Health Care AB. Tutti i diritti riservati. HQSU0106


Mölnlycke®