


Come funziona Mepilex® Border Heel

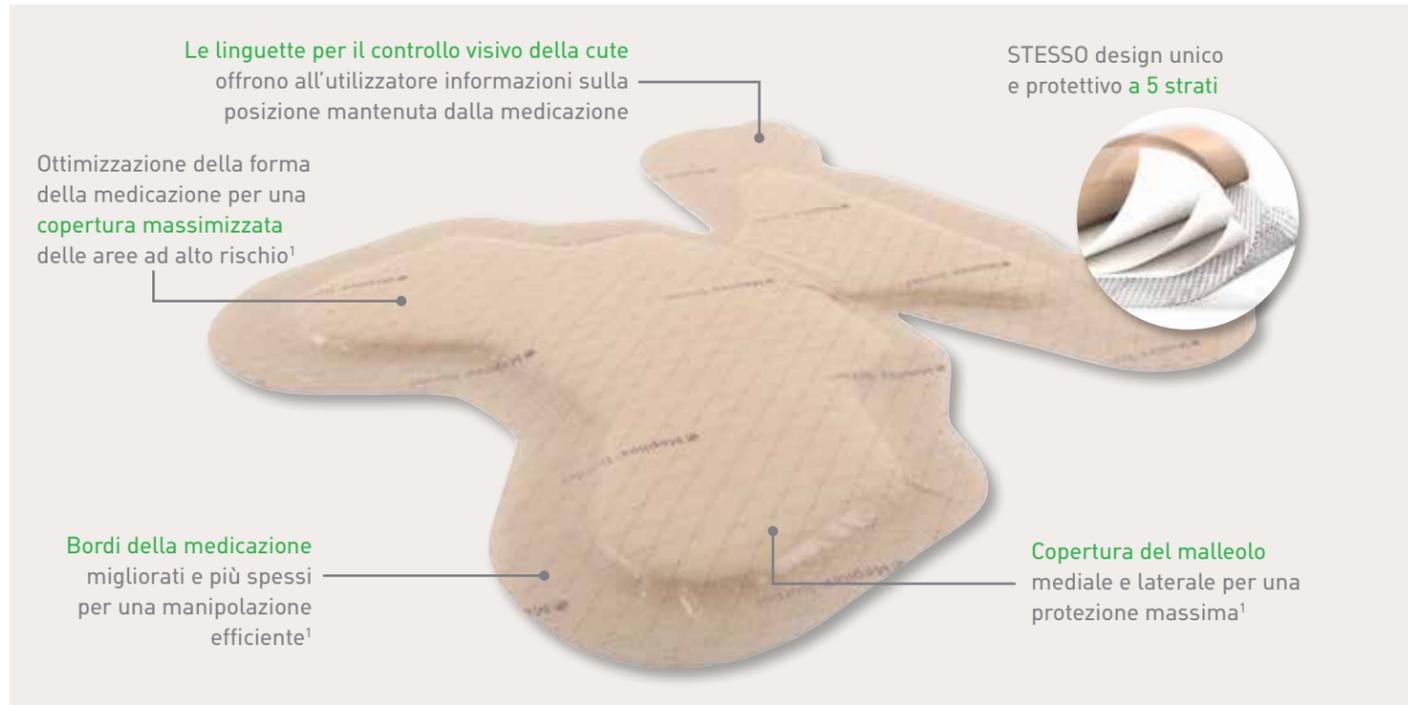

Prevenzione

Mepilex® Border Heel è una medicazione in schiuma all-in-one concepita per conformarsi al tallone e proteggere le aree circostanti, come il tendine di Achille e i malleoli bilaterali.

Utilizzata per la prevenzione*, aiuta a proteggere la cute dai danni causati da pressione, taglio e frizione². Lo strato Safetac® protegge la cute mantenendo un posizionamento ottimale e limitando frizioni e forze di taglio sull'interfaccia paziente-medicazione². Lo strato con Safetac® technology consente di riposizionare la medicazione dopo aver ispezionato la cute.

Vantaggi

- ✓ Alette per la manipolazione per un controllo più semplice della cute
- ✓ Bordo leggermente più spesso per una migliore manipolazione e capacità di rimanere in situ
- ✓ Autoaderente - non richiede alcun fissaggio secondario
- ✓ Forma adattata ai talloni - non è necessario tagliare o conformare la medicazione

Aree di utilizzo

Mepilex® Border Heel è progettata per essere applicata sul tallone per la prevenzione di danni cutanei oppure per il trattamento delle lesioni con essudato, incluse ulcere da pressione, ulcere del piede diabetico, ulcere del tallone, lesioni traumatiche e altre lesioni secondarie in via di guarigione.

Trattamento

Mepilex® Border Heel, utilizzata per il trattamento, assorbe e trattiene l'essudato³ in maniera efficace e mantiene un ambiente di guarigione umido. Lo strato Safetac® sigilla i bordi della lesione e previene le fuoriuscite di essudato sulla cute circostante, riducendo così al minimo il rischio di macerazione⁴. Lo strato Safetac® permette di cambiare la medicazione senza danneggiare la lesione o la cute circostante⁵ e senza causare altro dolore al paziente⁶.

- ✓ Riduce al minimo il dolore e il trauma al cambio della medicazione^{5, 6, 7}
- ✓ Copertura del malleolo mediale e laterale per una protezione massima
- ✓ Rimane in posizione per diversi giorni
- ✓ Può essere riposizionata senza comprometterne le caratteristiche di autoaderenza

Assortimento di Mepilex® Border Heel‡

Codice prodotto	Formato	Pz/conf.
282710**	22 x 23 cm	10

‡ Fornito sterile in confezioni singole

* Nell'ambito di un protocollo di prevenzione complessivo

Bibliografia: 1. Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. Mölnlycke Health Care (GMCS-2017-058) 2017 2. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012 3. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 4. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005 6. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008, Vol 4, No 1. 7. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care February, Vol 10, No 2. 2001

Per saperne di più: www.molnlycke.it

Mölnlycke Health Care Via Marsala 40/c, 21013 Gallarate (VA) - Italia Tel. 0331 714011 e-mail info.it@molnlycke.com
I marchi di fabbrica, le denominazioni e i loghi Mölnlycke, Mepilex e Safetac sono registrati globalmente a nome di una o più società appartenenti al gruppo Mölnlycke Health Care. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati. HQPR0033


Mölnlycke®

Mepilex® Border Heel

Guida all'applicazione del prodotto



Mepilex® Border Heel


Mölnlycke®

Guida all'applicazione del prodotto

Nota

In presenza di segni clinici di infezione, è possibile continuare ad utilizzare Mepilex® Border Heel iniziando una idonea terapia per controllare l'infezione. Non utilizzare la medicazione in presenza di escara asciutta e intatta.

Preparazione dell'area:

Detergere la cute integra. Asciugare perfettamente la cute circostante. Verificare che la cute sia priva di dimeticone, sigillanti per la pelle ed emollienti. Non è necessario l'impiego di una barriera cutanea sotto la medicazione.



1. Dopo aver eseguito la preparazione della cute/lesione, asciugare perfettamente l'area. A questo punto, rimuovere la pellicola di protezione centrale e posizionare la medicazione sotto il tallone fino alla posizione desiderata.



2. Applicare la parte aderente della medicazione contrassegnata dalla lettera 'A' [vedere la figura sopra] sull'area posteriore del tallone/tendine di Achille, posizionando la parte più stretta della medicazione alla base del tallone. Non tendere la medicazione.



3. Rimuovere la pellicola di protezione da uno dei lembi dell'area 'A' (lambi per la caviglia). Applicare e appiattire. Ripetere l'operazione sull'altro lato. Non tendere la medicazione.



4. Applicare delicatamente la parte aderente della medicazione contrassegnata dalla lettera 'B' (vedere la figura sopra) sotto la superficie plantare del piede. Non tendere la medicazione.



5. Rimuovere la pellicola di protezione da uno dei lembi dell'area 'B' (lambi con alette). Applicare e appiattire il bordo. Ripetere l'operazione sull'altro lato. Non tendere la medicazione.



6. Premere e appiattire la medicazione per far sì che l'intera superficie della medicazione sia a contatto con la cute.



Consigli e suggerimenti

- **Pensa alla 'A'** di 'Achille' per ricordarti come applicare correttamente la medicazione.
- Applica la medicazione sulla cute pulita e asciutta.
- Non tendere la medicazione durante l'applicazione.
- Applica un calzino antiscivolo se il paziente può deambulare - migliorerà anche la capacità della medicazione di rimanere in sede.
- Valuta l'utilizzo di Tubifast® o di altri bendaggi tubolari per offrire un sostegno aggiuntivo nel caso di pazienti molto agitati o ai quali la medicazione si stacca troppo presto: la medicazione è concepita per essere delicata sulla pelle

Prevenzione delle ulcere da pressione - Guida alla riapplicazione



1. Tirare delicatamente le linguette per la manipolazione per staccare la medicazione dalla cute.



2. Continuare a staccare la medicazione dalla cute utilizzando le alette per la manipolazione fino ad esporre la cute per eseguire il controllo.



3. Tenendo la medicazione in posizione sul bordo prossimale del lembo 'A' (vedere la figura), eseguire il controllo della cute.



4. Riapplicare la parte in schiuma e il bordo della medicazione. Verificare che i lembi con le alette siano applicati sopra i lembi per la caviglia.



5. Verificare che la medicazione sia stata riposizionata nella posizione originale e che il bordo sia integro e appiattito.



6. Premere e appiattire la medicazione per far sì che l'intera superficie della medicazione sia a contatto con la cute.

7. Riapplicare il calzino antiscivolo, se in uso, soprattutto per i pazienti che possono deambulare.