

BARRIER® Champ de main/ pied avec Drisite® Plus



- Matériaux résistants et renforcés dans la zone critique, pour une qualité fiable et un haut degré de résistance à la déchirure
- Drisite® Plus* assure une absorption et une gestion efficace des fluides
- Modèle conçu spécifiquement pour la chirurgie de la main et du pied
- Matériaux imperméables pour une sécurité optimale du patient
- Pliage optimal pour une application aseptique et une mise en place aisée par une seule personne



* Drisite® Plus est un système breveté pour la gestion des fluides se scinde en trois zones, composé d'une barrière sèche, résistante et absorbante.

Instructions d'utilisation



1. Champ de pied: dépliez la housse de table et placez-la sous la jambe du patient. Posez le champ suivant la direction indiquée par le pictogramme (côté long vers le haut).



2. Placez le champ de main/pied sur le pied du patient. Faites passer le pied du patient dans l'ouverture élastique.



3. Dépliez le champ sur le pied.



4. Dépliez la partie supérieure du champ par-dessus le cadre d'anesthésie.



1. Champ de main: dépliez la housse de table et placez-la sous la main du patient. Positionnez le champ de main/pied dans le sens indiqué par le pictogramme.



2. Placez le champ de main/pied sur la main du patient. Faites passer la main du patient dans l'ouverture élastique.



3. Dépliez le champ par-dessus le cadre d'anesthésie.



4. Dépliez le champ jusqu'au pied de la table d'opération.

Scannez le code QR pour plus d'informations sur Mölnlycke ou pour visionner des vidéos d'instructions.



| N° de réf. | Description | Disp/Trp |
|------------|---|----------|
| 60303 | Trousse de main/pied | 7/14 |
| | 1 housse de Mayo renforcée 79×145cm, 65×85cm absorbant 1 champ de main/pied 230×315cm, ouv. 3,5cm élastique 1 champ de table renforcé 150×190cm, 75×190cm absorbant | |
| 60302 | Trousse de main/pied | 7/14 |
| | 1 champ de main/pied 230×315cm, ouv. 3,5cm élastique 1 champ de table renforcé 150×190cm, 75×190cm absorbant 1 champ d'emballage 100×100cm | |
| 60308 | Champ de main/pied 150×180cm, ouv. 3,5cm élastique | 13/52 |
| 60309 | Champ de main/pied 230×315cm, ouv. 3,5cm élastique | 11/22 |

Tous ces composants des trousse peuvent également être inclus dans les trousse Mölnlycke®.

| N° de réf. | Composant de trousse composites Mölnlycke® |
|------------|--|
| 70308 | Champ de main/pied 150×180cm, ouv. 3,5cm élastique |
| 70309 | Champ de main/pied 230×315cm, ouv. 3,5cm élastique |

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke et BARRIER sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00841709)

Mölnlycke®